

AVENT

Naturally



F

Mode d'emploi

Prenez le temps de lire attentivement le mode d'emploi pour votre tire-lait ISIS. Vous devez absolument savoir comment il fonctionne et y être bien habituée chez vous avant de l'utiliser en dehors.

POUR AIDER LES MAMANS À ALLAITER PLUS LONGTEMPS

Le Coffret Vie Active AVENT vous permet de conserver le lait tiré en dehors de chez vous et de le rapporter à la maison en toute sécurité. Vous pouvez maintenir votre lactation en tirant votre lait pendant la journée aux heures où vous allaiteriez normalement, et remettre bébé au sein quand vous le retrouvez.

Avant de vous servir de votre Coffret Vie Active, consultez votre médecin, votre sage-femme ou une conseillère en allaitement pour établir votre routine d'expression.

Contenu:

TIRE-LAIT ISIS

Cliniquement prouvé aussi efficace qu'un tire-lait électrique* ou à piles†. Avec coussin masseur breveté ("Let-down" massage cushion™) conçu pour imiter la tétée naturelle et stimuler la montée du lait.

VALISSETTE ISOLANTE

Spécialement conçue par AVENT® et Thermos®, cette valisette/sac à main conserve votre lait au froid pendant 6 heures grâce aux sachets de gel réfrigérant fournis.

4 BIBERONS DE CONSERVATION

2 Biberons AVENT de 125 ml et 2 Biberons AVENT de 260 ml. Conviennent au congélateur et au lave-vaisselle. Se vissent aux tire-laits AVENT. Une tétine AVENT dans la bague à la place du disque d'étanchéité les reconvertissent en biberons AVENT, spécialement adaptés aux habitudes des bébés nourris au sein. 2 tétines AVENT nouveau-né sont incluses car elles sont les plus adaptées à l'allaitement

mixte. (Tétines à Débit Lent, Moyen, Rapide et Variable disponibles séparément). Tous les Biberons AVENT (y compris le Biberon à Sachets) se vissent au tire-lait ISIS.

SACHETS SOUPLES DE GEL RÉFRIGÉRANT

Les sachets réfrigérants AVENT SONT À METTRE AU CONGÉLATEUR AU MOINS 2 HEURES avant chaque emploi. Inoffensifs et conformes à l'usage indiqué, ils sont réutilisables à volonté et restent souples quand ils sont congelés.




COUSSINETS ULTRA CONFORT

Pour protéger vos vêtements de fuites de lait pendant la journée.

AVANT DE QUITTER LA MAISON

Avant de partir, assurez-vous que votre tire-lait ISIS, vos biberons de conservation et vos disques d'étanchéité sont lavés et stérilisés. Les mains propres, rassemblez votre tire-lait selon les indications du mode d'emploi de votre tire-lait ISIS, en utilisant la protection de base et le couvercle à entonnoir pour garder le tire-lait compact et stérilisé pendant votre déplacement. Ne vissez pas encore de biberon au tire-lait. Glissez les disques d'étanchéité dans leurs bagues et vissez-les aux biberons.

Placez les sachets réfrigérants sortis du congélateur dans le sac isolant selon les indications ci-dessous. La sangle en velcro retiendra le tire-lait à sa place, le manche serré contre la pompe.

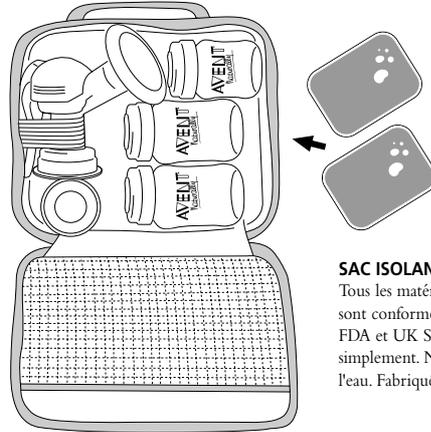

SAC ISOLANT THERMOS

Tous les matériaux du sac isolant sont conformes aux règlements FDA et UK SI: 3145. Essayez simplement. Ne plongez pas dans l'eau. Fabriqué en Chine.

ARRIVÉE À VOTRE DESTINATION

Dès que vous êtes arrivée, mettez les sachets réfrigérants dans la section congélateur d'un réfrigérateur et laissez-les y jusqu'à votre départ.

Quand vous êtes prête à tirer du lait, lavez-vous bien les mains et passez une serviette propre et humide sur vos seins.

Enlevez le couvercle de l'entonnoir et dévissez la base étanche pour mettre le biberon de conservation à sa place. Quand le biberon est plein, dévissez-le du tire-lait; pour le couvrir, remettez-lui sa bague munie du disque d'étanchéité. Quand vous avez fini de l'utiliser, lavez le tire-lait, remettez le couvercle à l'entonnoir et revissez la base. Si vous allez réutiliser le tire-lait, restérilisez-le.

Les biberons une fois remplis de lait maternel doivent être réfrigérés immédiatement dans la poche en plastique fournie.

Au moment de rentrer chez vous, sortez les biberons du réfrigérateur et placez-les dans le sac isolant selon les indications. Sortez les sachets réfrigérants du congélateur et placez-les contre les biberons pleins maintenir le lait froid pendant le trajet. Fermez bien le sac.

NB: Une fois sortis du congélateur, les sachets réfrigérants AVENT maintiendront le sac isotherme à basse température pendant 6 heures. Si vous devez conserver votre lait plus longtemps, et que vous n'avez pas accès à un réfrigérateur, vous devrez acquérir 7 fl oz / 200 gms de gel réfrigérant en plus, ce qui vous permettra de conserver votre lait pendant 12 heures dans votre sac isotherme.

UNE FOIS CHEZ VOUS

Dès que vous êtes rentrée, mettez le lait au réfrigérateur ou au congélateur et les sachets réfrigérants au congélateur. Le lait se conserve 24 heures maximum au réfrigérateur et 3 mois maximum au congélateur. **IL FAUT** stériliser votre tire-lait ISIS et vos biberons de conservation avant chaque utilisation et essuyer le sac avec un chiffon humide après chaque utilisation.

Si vous avez besoin de pièces de rechange, de renseignements, ou si vous voulez consulter notre catalogue, appelez notre:

France: Numéro Vert 0800 90 81 54

Thermos® est la marque déposée du "Thermos Group of Companies"

* Randomized Trial Comparing the Efficacy of a Novel Manual Breast Pump With a Standard Electric Breast Pump in Mothers Who Delivered Preterm Infants. M S Fweltrell, P Lucas et al. MRC Childhood Nutrition Research Centre, London. Pediatrics June 2001.

† Randomized Study Comparing the Efficacy of a Novel Manual Breast Pump With a Mini-Electric Breast Pump in Mothers of Term Infants. M S Fweltrell, P Lucas et al. MRC Childhood Nutrition Research Centre, London. Journal of Human Lactation May 2001.